

## ПАСПОРТ

### Руководство по сборке и эксплуатации

#### Табурет медицинский для лечебных учреждений Т06

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ 32.50.30-004-34960786-2019  
Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/14497 от 01.06.2021

#### Назначение и описание изделия

Табурет Т06 на газ лифте предназначен для сидения.

Область применения – медицинские учреждения, производственные помещения, учебные помещения, лаборатории, лечебно-профилактические учреждения, социальные учреждения, офисы и другие помещения.

Каркас – стальной с гальваническим покрытием, оснащён кольцом – опорой для ног диаметром 320 мм. Основание – пятилучье на колесных опорах 50 мм, диаметр основания – 430 мм. Механизм подъема – газ лифт, высота сиденья регулируется от 450 мм до 610 мм.

Сиденье из полиуретана – два варианта исполнения: круглое (диаметр 360 мм, толщина 40 мм) или прямоугольное (370x350 мм, толщина 30 мм).

Вес изделия – 5 кг.

Упаковка – 2 места. Габаритные размеры упаковки:

- каркас – 370x110x370 мм, вес – 3,5 кг, объем – 0,016 м<sup>3</sup>,  
- сиденье – 370x360x80 мм, вес – 1,5 кг, объем – 0,01 м<sup>3</sup>.

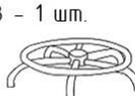
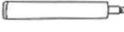
#### Комплектация и инструкция по сборке

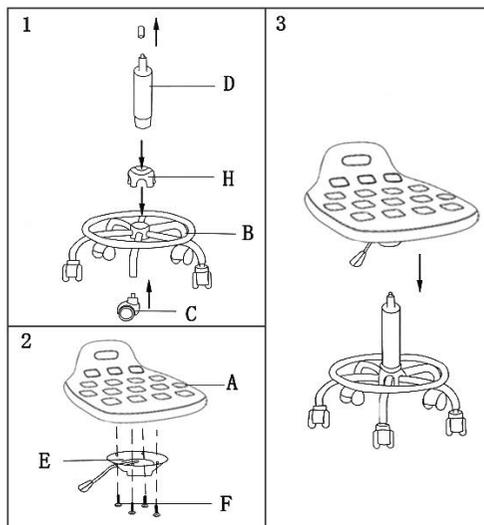
Изделие поставляется в разобранном виде.

Аккуратно распаковать изделие и все комплектующие.

Перед сборкой снять защитный колпачок с газ лифта.

Установить колёсные опоры (ролики) в основание каркаса до характерного «щелчка».

A – 1 шт. 	E – 1 шт. 
B – 1 шт. 	F – 4 шт. 
C – 5 шт. 	G – 1 шт. 
D – 1 шт. 	H – 1 шт. 



Модель может поставляться на неподвижных глайдерах – заглушках.

#### Правила по эксплуатации мебели

1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 16371 "Мебель. Общие технические условия" и ГОСТ 19917 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия".
2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +10°C и не выше +35°C, и относительной влажностью 45 – 70%.
3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов.
5. Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
6. Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

#### Уход за окрашенными и хромированными поверхностями

1. Хромированные и окрашенные порошковыми красками поверхности, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
2. Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Уход за полиуретаном

1. Изделия из полиуретана удобно и быстро очищаются, выдерживают обработку дезинфицирующими и моющими средствами.
2. При загрязнении или потере лоска достаточно обработки поверхности салфеткой, смоченной в мыльном растворе комнатной температуры. Можно применять и обычный стиральный порошок для ручной стирки. Затем нужно протереть изделие бархатной тряпочкой, использовав при этом специальный силиконовый блеск.
3. Полиуретан устойчив к кратковременному воздействию температуры, поэтому избегайте длительного и чрезмерного нагрева или прямого попадания на него солнечных лучей.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией;

Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и другие изделия, не предусмотренные в конструкции.

www.cncmagazine.ru | sales@cncmagazine.ru | 8 (800) 555-41-16